

Artikel Nr	Artikel	Maat	Aantrek-instructie – Maattabel	Halsomvang in cm	Borstomvang in cm	afstand tussen de voor- en achterpoten in cm
Teven – Art.No. 10.011 – 10.016 – Etiket met rode Punt			Reuen – Art.No. 10.021 – 10.026 – Etiket met blauwe Punt			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	kleine yorkshire terriër, kleine lhasa, chihuahua, papillion	15-20	20-30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	malteser, dwergteckel, dwergpoedel, keeshond, terriër, bichon	20-25	30-40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	teckel, foxterriër, jack russell terriër, mops, poedel, beagle	25-35	40-50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	collie, appenzeller, chow-chow, schnauzer, cockerspaniël	35-45	45-60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	herdershond, dobermann, dalmatiër, golden retriever, dog	45-55	60-75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	sint-bernardshond, mastiff, grote herdershond, rottweiler, Deense dog	55-60	65-90	67

TIPS

1. Bij elke **dog&cat-body** is de binnenkant van de bovenkant (voor) een etiket met de maat (xs, s, m, l, xl, xxl) aangebracht.
2. Trek de **dog&cat-body** eerst over uw hand, zodat het uiteinde van de **dog&cat-body** aan uw vingertoppen zit. Trek deze nu over de kop van de hond of de kat, steek de voorpoten en daarna de achterpoten erdoor. Bij reuen nog de penis bij de opening uit laten steken.
3. Strijk de **dog&cat-body** glad. **Klaar.**
4. **Keuze van de maat:** de afstand tussen de voor- en achterpoten en de borstomvang geven u snel een indicatie. Bovendien kunt u de aangegeven rasnamen raadplegen.
5. Omdat het hoogwaardige materiaal **elastaan en polyamide** in de lengte als ook in de breedte elastisch is, moet de **dog&cat-body** iets kleiner dan de hond of de kat zijn, zodat deze goed zit. Bovendien bevordert het stretcheffect van de **dog&cat-body** bij de teef een grotere kanteling van de onderrug, waardoor de teef gemakkelijker kan „plassen“.

		Onderhoud:    
		Materiaal: 90 % polyamide 10 % elastaan (90/10) PA/EL

Wij wensen u veel plezier met dit hoogwaardige product. Neem bij vragen eenvoudig contact met ons op per FAX of per E-MAIL.