


SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

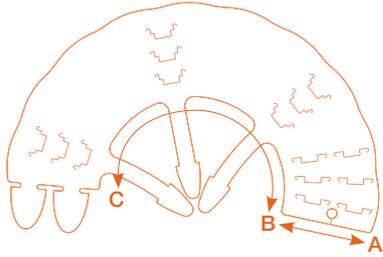

Système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes.

- 3 à 5 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.

MONTAGE

Engager les languettes latérales (les plus épaisses) dans les découpes choisies, côté lisse à l'intérieur, **puis les faire ressortir dans les découpes suivantes.**


Faire la même chose avec les petites languettes.




DÉMONTAGE

Bien plier (marquer fermement le pli) le volet mobile qui dépasse après le montage.

Faire ressortir les languettes des découpes en tirant.

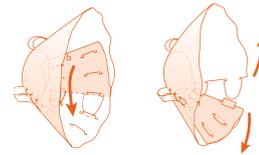

SYSTÈME D'ATTACHE STANDARD

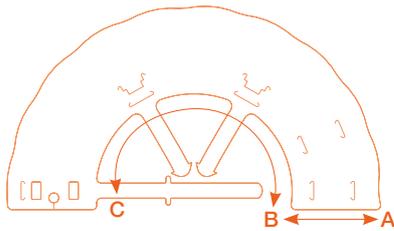

Système d'attache classique sécurisé, une attache solidaire du carcan de l'animal, les autres se fixant individuellement sur le collier.

- 2 à 3 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.

MONTAGE

Placer la face perforée sur le dessus, côté lisse à l'intérieur.

Faire glisser la grande languette dans la découpe choisie.

Passer dessus-dessous.

Procéder de la même manière avec les petites languettes.




DÉMONTAGE

Tirer la languette.



SYSTÈME D'ATTACHE SCRATCH

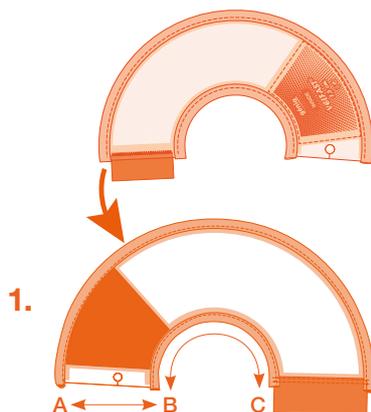


MONTAGE

Positionner le Velfast® pour que l'inscription « inside » se retrouve sur la peau de l'animal (1).

Ajustez le Velfast® autour du cou de l'animal, vous devez pouvoir passer facilement un doigt entre le carcan et la peau (2).

Superposez et collez les bandes auto-agrippantes en utilisant toute la surface disponible, sans la dépasser (3).

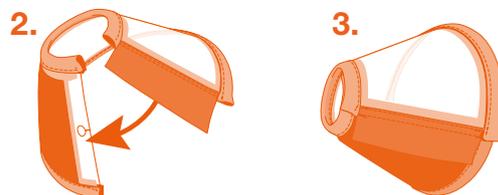

GAMME CARCANS



injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale



toiletage

génia

ALCYON
BELUX

CARCANS - SYSTÈME D'ATTACHE SCRATCH

VELFAST®

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore avec double liseré néoprène.

- Liseré néoprène périphérique souple et silencieux, amortissant les chocs et le bruit. Il permet un meilleur confort pour l'animal et une adaptation plus rapide au port du carcan.
- Fixation simple et rapide par scratch offrant une excellente résistance à l'arrachage.
- Réglage de la bande scratch selon le tour de cou.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.



Fixation ultra-rapide

Code x 12 VELFAST	Taille	Tour de cou	
		min.	max.
306450	7,5 cm	14 cm	17 cm
306452	10 cm	18 cm	23 cm
306454	12,5 cm	24 cm	29 cm
306456	15 cm	30 cm	36 cm
306458	20 cm	37 cm	43 cm
306460	25 cm	44 cm	50 cm
306462	30 cm	51 cm	58 cm
306468	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm)		

Code	Modèle
306117	Support mural

IMPORTANTE AMPLITUDE
DE RÉGLAGE |

CONFORTABLE |



Retrouvez la
vidéo ici !

CARCANS - SYSTÈME D'ATTACHE CLASSIQUE

NECKY

NOUVEAU

Colliers carcans en polypropylène TRANSPARENT incolore.

- Fixations standard.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.

SMOCKY®

Colliers carcans en polypropylène OPAQUE incolore.

- Fixations standard.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Face intérieure lisse, face extérieure sablée.

Livré par 12 sous un emballage carton.



80 % RECYCLÉ |
100 % RECYCLABLE |

NOUVELLE TAILLE
17,5 CM |



CARCAN
OPAQUE |

Code x 12 NECKY	Code x 12 SMOCKY	Taille	Tour de cou	
			Mini	Maxi
306000	306400	7,5 cm	25 cm	28 cm
306002	306402	10 cm	22 cm	28 cm
306004	306404	12,5 cm	25 cm	33 cm
306006	306406	15 cm	33 cm	41 cm
306007	-	17,5 cm	35 cm	43 cm
306008	306408	20 cm	37 cm	46 cm
306010	306410	25 cm	43 cm	52 cm
306012	306412	30 cm	47 cm	58 cm
306013	306413	35 cm	54 cm	70 cm
306014	306414	40 cm	62 cm	80 cm
306016	306416	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm.)		

Code	Modèle
306117	Support mural



OUILLET D'ACCROCHAGE
POUR LE SUPPORT MURAL |



Retrouvez la
vidéo ici !



HOSPITALISATION

ALCYON
BELUX

www.genia.fr

genia

■ TRANSCOL

Colliers carcans en polypropylène transparent coloré.

- Fixations rapides.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CODE COULEUR |
PAR TAILLE

■ FUNCOL®

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec impression de motifs colorés en forme de pattes.

- Fixations rapides.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Nouvelles tailles disponibles : 17,5 cm, 35 cm et 40 cm.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CODE COULEUR |
PAR TAILLE

■ GREENCOL

NOUVEAU

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore.

- Fixations rapides.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.



80 % RECYCLÉ |
100 % RECYCLABLE

NOUVELLE TAILLE |
17,5 CM

■ NEOCOL®

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec liseré néoprène amortissant et réfléchissant.

- Fixations rapides.
- Lignes anti-rayures en relief.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CODE COULEUR |
PAR TAILLE

AMORTISSANT ET
RÉFLÉCHISSANT

Code x 12 TRANSCOL	Code x 12 FUNCOL	Code x 12 GREENCOL	Code x 12 NEOCOL	Taille	Tour de cou	
					Mini	Maxi
306100	306200	306300	306420	7,5 cm	25 cm	28 cm
306102	306202	306302	306422	10 cm	22 cm	28 cm
306104	306204	306304	306424	12,5 cm	25 cm	33 cm
306106	306206	306306	306426	15 cm	33 cm	41 cm
-	306218	306307	-	17,5 cm	35 cm	43 cm
306108	306208	306308	306428	20 cm	37 cm	46 cm
306110	306210	306310	306430	25 cm	43 cm	52 cm
306112	306212	306312	306432	30 cm	47 cm	58 cm
-	306213	306314	-	35 cm	54 cm	70 cm
-	306214	306315	-	40 cm	62 cm	80 cm
306116	306216	306316	306438	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm)		

Code	Modèle
306117	Support mural



Retrouvez la
vidéo ici !

