


CPV Ag

KIT VOOR SNELLE DIAGNOSE

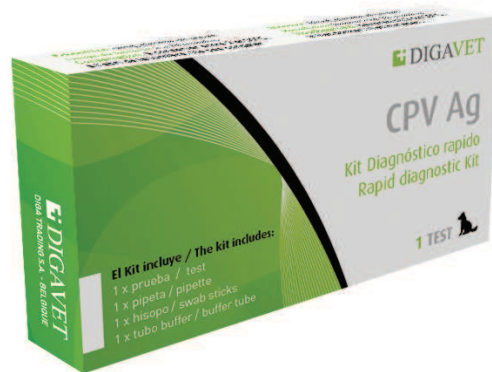

■ **AANGEWEEZEN BIJ:** De CPV Ag test is bestemd om het antigeen op te sporen tegen het **parvovirus bij honden** in de ontlasting van de hond.

■ **BEGINSEL:** Immunochromatografie

■ **STAAL:** ontlasting

■ **AFLEESTIJD:** 5 tot 10 minuten


■ **GEVOELIGHEID:** 100%

■ **SPECIFICITEIT:** 98.8%


■ SAMENSTELLING VAN DE KIT

- 1 test
- 1 wattenstaafje
- 1 monsterbuisje
- 1 pipet
- 1 folder


■ PROCEDURE VAN DE TEST:

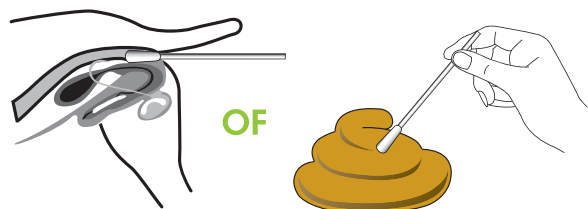


1. Neem een staal van de ontlasting of via een anaal uitstrijkje door middel van het wattenstaafje.

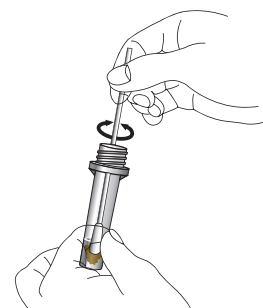

2. Stop het wattenstaafje in het monsterbuisje en draai het wattenstaafje een tiental keer krachtig rond.

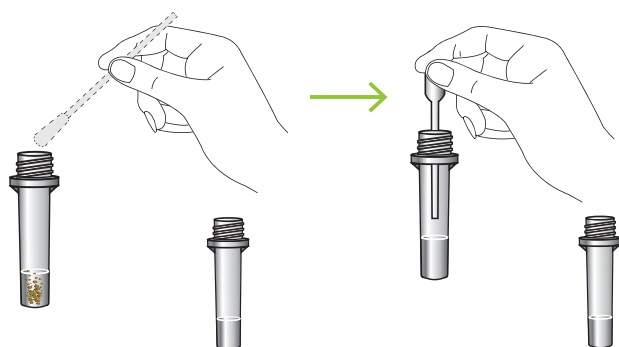

3. Verwijder het wattenstaafje en veeg het goed af tegen de wanden van het buisje.

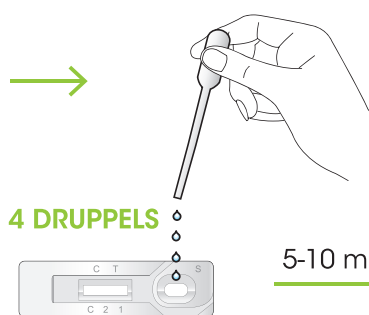

4 DRUPPELS

4. Neem de bovendrijvende vloeistof af met behulp van het pipet

5. Druppel 4 druppels in de juiste opening van de test.

5-10 min.

