

Debrisoft® met Actitop fibre technology de slimme manier van debrideren

Debrisoft® bestaat uit een unieke, hoogtechnologische polyestervezel voor een uiterst efficiënt resultaat en een versterkte rugzijde voor een eenvoudig en veilig gebruik.

- Debrisoft staat dan ook voor een volledig nieuwe debridementmethode
- Kan worden gebruikt met alle klassieke wondspoeloplossingen
- Goede binding van debrisis, wordt vastgehouden in het kompres
- Snel
- Zacht / soepel
- Efficiënt
- Veilig en eenvoudig gebruik
- Pijnloos



Tevreden patiënten en verplegend personeel

Wondbedvoorbereiding Enkel een zuivere wonde kan genezen

In het kader van de wondbedvoorbereiding gebruikt men Debrisoft® voor een snel, uiterst efficiënt, veilig en pijnloos debridement van oppervlakkige wonden en de huid rond de wonde, bv. bij :

- > diabetisch ulcus
- > arterieel en veneus ulcus
- > decubitusletsels
- > postoperatief secundair genezende wonden

Bovendien kan Debrisoft® tijdens het debridement worden aangewend voor het opnemen van exsudaat, debrisis en huidkeratose. Intact weefsel wordt niet beschadigd. Debrisoft® geeft ook bij sterk keratotisch, necrotisch beslag zeer goede resultaten, terwijl dit voordien autolytisch behandeld diende te worden.

Eenvoudig en veilig in gebruik



De zachte vezelkant van Debrisoft® dient te worden bevochtigd met een type wondspoelmiddel naar keuze.

Met de zachte vezels wrijft men onder lichte druk, over de wonde. Dankzij het zachte oppervlak wordt pijn vermeden.

De schuine vezeltoppen maken heel efficiënt debrisis en exsudaat los uit de wonde, ook schilfers en keratose rond de wonde worden verwijderd.

De dichte vezelcomposiet, 18 miljoen vezels op 10 x 10 cm, absorbeert de losgemaakte laag en de keratosen en houdt die vast.

De behandeling neemt 2 tot 4 minuten in beslag.



Debrisoft® steriel • afzonderlijk verpakt			
	REF	CNK	Verpakking
10 x 10 cm	31 222	2749 711	5 st.