

FIV Ab + FELV Ag

KIT VOOR SNELLE DIAGNOSE



■ **AANGEWZEN BIJ:** De FIV Ab + FeLV Ag is bestemd om de antilichamen op te sporen tegen het **FIV (immunodeficiëntievirus bij katten of kattenaids)** en om de antigenen op te sporen tegen **FeLV (leukemievirus bij katten)**.

■ **BEGINSEL:** Immunochromatografie

■ **STAAL:** Bloed, serum, plasma

■ **AFLEESTIJD:** 10 minuten

■ **GEVOELIGHEID:** 99.7% voor FIV
94.7% voor FeLV

■ **SPECIFICITEIT:** 99.6% voor FIV
96.8% voor FeLV

■ SAMENSTELLING VAN DE KIT

- 1 test
- 1 buffer/verdunnende oplossing
- 1 monsterbuisje
- 1 pipet
- 1 folder


■ PROCEDURE VAN DE TEST:

1. Het staal voorbereiden

Bloed: Neem het bloedstaal af en doe het in het monsterbuisje (EDTA).

Serum: Neem het bloedstaal af en doe het in het monsterbuisje (zonder EDTA). Wacht 30 minuten, centrifugeer het buisje en neem het bovendrijvende serum af.

Plasma: Neem het bloedstaal af en doe het in het monsterbuisje (EDTA). Centrifugeer vervolgens om het plasma te bekomen.

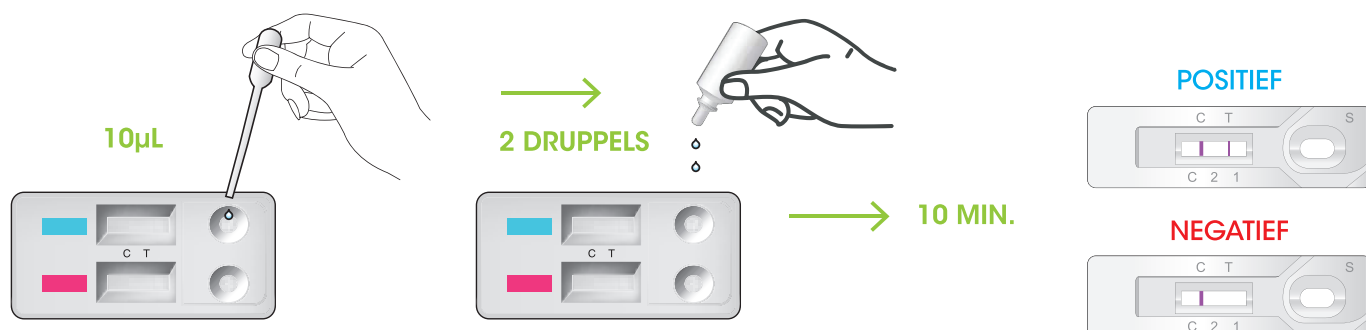

2. Voeg 10µL bloed, serum of plasma toe met het behulp van het pipet. De hoeveelheid van 10µL wordt aangeduid door een streepje op het pipet.

3. Voeg twee druppels buffer toe in de juiste opening.

