

UMONIUM³⁸

MEDICAL SPRAY



✓ FORMULE ZONDER

- CMR-COMPONENT**
- HORMOONONTREGELAAR

“ Uw beste wapen:
actief vanaf 30 seconden ”

FLASH DESINFECTIE
VANAF 30 SEC.



UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY, zonder aldehyde, peroxide en biguanide (CMR-componenten**), is uw beste wapen tegen besmetting. Actief vanaf 30 seconden contacttijd. Breedspectrumdesinfectie, ideaal voor een omgeving die een dagelijkse desinfectie vereist. Geen enkel risico voor de gebruiker, de patiënt, het materiaal of het milieu. Het eenvoudige en ergonomische pistool met dubbele werking verspreidt een schuim dat ideaal is voor de reiniging of verstuipt een fijne straal voor een optimale desinfectie. Aanbevolen voor kwetsbare materialen zoals plexiglas, silicone, polyurethaan, rubber...

 **laboratoire
HUCKERT'S**
INTERNATIONAL

SINCE 1957

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch

www.huckerts.net





UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY

1 l komt overeen met 1000 verstuivingen en is voldoende voor de behandeling van een oppervlak van 200 m².



✓ **FORMULE ZONDER**
→ CMR-COMPONENT**
→ HORMOONONTREGELAAR

INDICATIES

Reiniging en desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen vóór sterilisatie. Reiniging en desinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen en oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen. Vervoer van vervuilde instrumenten.

SAMENSTELLING

N-benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethylammonium chloride/N-benzyl-N,N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 3,3g/L

NORMatieve STANDaARDEN

- In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (bijlage II, excl. §4)
- Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.
- CE-markering 1639

GEbruIKSAANWIJZING

Vervoer: De spray in de "schuim" positie zetten en de hulpmiddelen met schuim bedekken. Afdekken om verdamping te beperken. **Reiniging/Pre-desinfectie** De spray in de "schuim" positie zetten. Verstuiven en de hulpmiddelen borstelen om vuil te verwijderen. Grondig spoelen met water* of met een met water* bevochtigd doekje voor oppervlakken. **Desinfectie:** De spray op de "fijne" positie zetten. Verstuiven op schone hulpmiddelen. Minimale contacttijd van 5 minuten respecteren. Voor invasieve medische hulpmiddelen: Spoelen met water*. Voor oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen: Laten drogen of spoelen met water* (of met een met water* bevochtigd doekje) indien nodig.

EIGENSCHAPPEN

- Medisch hulpmiddel Klasse IIb
- Reinigings- en desinfectiemiddel met een breed werkingsspectrum
- Niet toxisch, geen gevaarlijke dampen
- LD₅₀ (rat): > 5840 mg/kg
- Niet corrosief: pH-neutraal
- Gebruiksklaar product, irriteert de huid niet (geen transdermale toxiciteit)
- Zonder aldehyde, peroxyde, biguanide of andere carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen
- Stolt niet
- Niet ontvlambaar
- Bactericide (inclusief MRSA en andere aan antibiotica resistente stammen), fungicide, mycobactericide en virucide (inclusief humaan coronavirus)
- 100% compatibel met optische vezel, rubber, polycarbonaat, acrylstoffen, glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verven, roestvrij staal 410
- Doeltreffend, snel en krachtig (lost bloed op)
- Doeltreffend in aanwezigheid van organische materialen
- Actief vanaf 30 seconden
- Residuele werking op niet-gespoelde oppervlakken (bacteriostatische film)
- Zonder residu na spoeling
- Stabiliteit: 36 maanden na productiedatum




ARTIKELNR.	BENAMING	DOOS
PF 12209	Sprayflacon 1l	12 x 1 l
EMB 0099	100 tissues UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks
EMB 5206	Roestvrijstalen flaconhouder 1 l	1 stuk

GEbruIKSPROCEDURE


STAP 1 : VERVOER



De spray in de "schuim" positie zetten

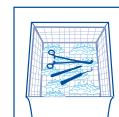

De hulpmiddelen bedekken met schuim

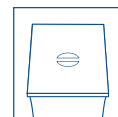

Afdekken om verdamping te beperken

STAP 2 : REINIGING/PRE-DESINFECTIE



De spray in de "schuim" positie zetten en verstuiven




De hulpmiddelen afborstelen om alle vuil te verwijderen




Grondig spoelen met water* of met een met water* bevochtigd doekje voor oppervlakken

STAP 3 : DESINFECTIE

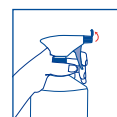

De spray op de "fijne" positie

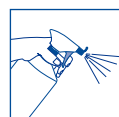

Verstuiven



Minimale contacttijd van 5 minuten respecteren



OF



Voor invasieve medische hulpmiddelen: Spoelen met water* **OF Voor oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen:** Laten drogen of spoelen met water* (of met een met water* bevochtigd doekje) indien nodig

TECHNISCHE GEGEVENS

Normen	Doelorganismen	Contacttijd (min.)	
		Propere toestand	Vuile toestand
EN 13727	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i>	30 sec.	1
	<i>E. faecalis</i> (vancomycine-resistent), <i>E. coli</i> (carbapenem-resistent), <i>K. pneumoniae</i> (carbapenem-resistent), <i>S. aureus</i> (methicilline-resistent)	30 sec.	-
	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i>	10	15
	<i>S. typhimurium</i> , <i>E. cloacae</i> , <i>L. brevis</i>	-	15
	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i>	5	-
EN 14561	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i>	-	30
EN 13624	<i>C. albicans</i>	5	10
EN 13697	<i>C. albicans</i>	10	15
EN 16615	<i>C. albicans</i>	1	-
EN 14562	<i>C. auris</i>	30 sec.	30 sec.
	<i>C. albicans</i> , <i>A. niger</i>	10	10
EN 14476	Norovirus, Adenovirus, Poliovirus	10	10
	Humaan coronavirus, Vaccinia virus	5	-
	Vaccinia virus	-	30
EN 16777	Vaccinia virus	-	30
EN 14348	<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>	10	10
EN 14563	<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>	10	10

* Kraanwater op kamertemperatuur

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch