

FPV Ag

KIT DE DIAGNOSTIC RAPIDE

■ **INDICATION** : Le test FPV Ag est destiné à détecter les antigènes du FPV (**PANLEUCOPÉNIE Féline, également appelée le parvovirus du chat**) dans les selles du chat.

■ **PRINCIPE** : Immunochromatographie

■ **ECHANTILLON** : selles

■ **TEMPS DE LECTURE** : 5 à 10 minutes


■ **SENSIBILITÉ** : est de 97.5%

■ **SPÉCIFICITÉ** : est de 98.5%


■ **COMPOSITION DU KIT** :

- 1 x test
- 1 x coton tige
- 1 x Tube à échantillon
- 1 x Pipette
- 1 x Prospectus


■ **PROCÉDURE DU TEST** :

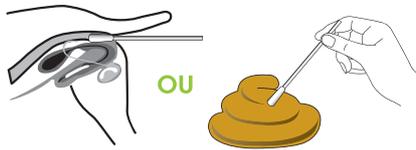


1. Collecter l'échantillon dans les selles ou via un frottis anal en utilisant le coton tige

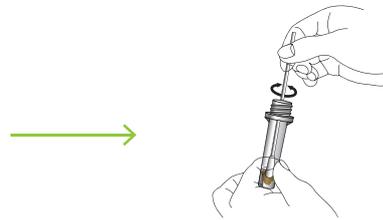

2. Insérer le coton tige dans le tube à échantillon et tourner le coton tige vigoureusement une dizaine de fois

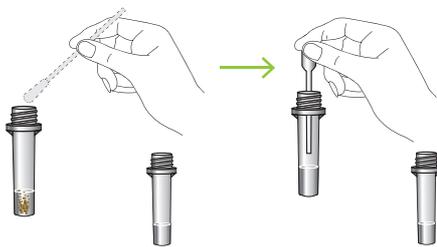

3. Retirer le coton tige en l'essuyant bien contre les parois du tube

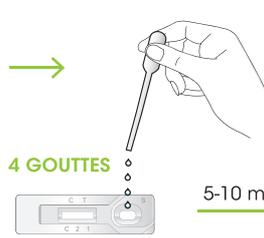

4. Prélever le liquide surnageant au moyen de la pipette

5. Déposer 4 gouttes dans l'orifice adéquat du test.

