



BODY DE PROTECTION POUR CHIEN




injection



chirurgie



orthopédie

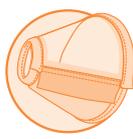

hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale

génia

VETBODY


EN COMPLÉMENT
OU EN
REMPACEMENT
DU COLLIER
CARCAN

CONFORTABLE



Body de protection pour chien avec fermetures par boutons pressions.

- Utilisable après une chirurgie, pour protéger la plaie, ou lors de pathologies cutanées.
- Composition : 75% polyester, 25% élasthanne.
- Matière douce, chaude et confortable.
- Matière alliant résistance et élasticité pour une grande facilité de mouvements.
- Système de fermeture unique et facile par boutons pressions. Permet un ajustement optimal à la silhouette de l'animal.
- Lavable en machine à 30°C. Sèche-linge non recommandé.
- Disponible en 9 tailles.

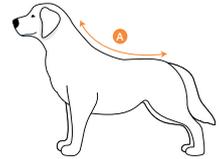

Livré à l'unité.



UTILISATION EN
SOIN PORT-OPÉRATOIRE



UTILISATION EN
DERMATOLOGIE

Code	Taille	A Longueur du dos	Exemples de races de chiens
305000	4 XS	20 - 25 cm	Petit Chihuahua, chiot de petite race
305005	3 XS	28 - 33 cm	Caniche toy, Chihuahua
305010	2 XS	33 - 39 cm	Yorkshire terrier, Teckel, Bichon
305015	XS	42 - 49 cm	Boston terrier, Carlin
305020	S	46 - 54 cm	Bouledogue français
305025	M	48 - 57 cm	Cocker anglais, Beagle
305030	L	60 - 67 cm	Epagneul breton, Border Collie, Boxer
305035	XL	62 - 72 cm	Berger allemand, Labrador
305040	2 XL	72 - 83 cm	Cane Corso

SYSTÈME DE FERMETURE PAR BOUTONS PRESSIONS

Body de protection pour chiens

Vetbody est un vêtement de protection utilisable après une intervention chirurgicale, ou lors d'affections cutanées. Il peut être utilisé en complément ou remplacement d'un collier carcan.

Mode d'emploi : Sélectionner la taille adaptée en fonction de la longueur du dos A (cf schéma) et du gabarit du chien. Commencer par attacher les boutons pressions autour des 4 pattes, en respectant le repère couleur (rouge contre rouge).

Remarque : Il y a plusieurs possibilités de réglage pour les tours de pattes.

Puis terminer par la fermeture de la ligne ventrale et celle du cou.

S'assurer que le body est bien ajusté (ni trop serré, ni trop ample). Au besoin, essayer une autre taille.

Pour les besoins de votre animal, ôter simplement les boutons pressions rouges des pattes arrière, puis enrouler délicatement le body sur lui-même jusqu'à mi-abdomen environ.

ATTENTION : il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de la ou des plaies de l'animal.



LE TUTO
VIDÉO ICI !

