



Sekumatic® FNZ

VLOEIBARE ZURE NEUTRALISATOR

- ▲ Lage dosering
- ▲ Efficiënte neutralisatie
- ▲ Universeel inzetbaar



Sekumatic® FNZ

VLOEIBARE ZURE NEUTRALISATOR



Eigenschappen

Voordelen

Op basis van citroenzuur

Voor neutralisatie na alkalische reiniging van chirurgische instrumenten. Geschikt voor verchroomde instrumenten

Efficiënte formule

Goede werking bij lage dosering, geen schuimvorming

Optimale formulering

Geschikt voor zuurbestendige materialen in medische omgeving

TOEPASSING

Voor het neutraliseren na alkalische reiniging van chirurgisch instrumentarium, kunststofhulpmiddelen en elastomeren (bijv. rubber) uit anesthesie, chirurgie en urologie. Ook geschikt voor laboratorium-glas.

Geschikt voor gebruik in elk type instrumentenwasmachine.

NIET combineren met geanodiseerd aluminium

GEBRUIKSAANWIJZING

Dosering :

Kies het programma volgens de opgave van de machinefabrikant.

Doseer ca. 1 ml/liter over de ingebouwde zuurbestendige doseerpomp of doseerunit in de deur.

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

SAMENSTELLING

Op basis van citroenzuur.

VERPAKKING / REFERENTIE

Bidon 5 L - Verpakking : 3 x 5 L
Ref. : 3023510

Bidon 20 L - Verpakking : 1 x 20 L
Ref. : 3023500

Vat 200 L - Verpakking : 1 x 200 L
Ref. : 3026550

Chemische gegevens		
Dichtheid :	20°C	1,16 g/ml
pH-waarde (onverdund) :	20°C	Ca. 2,3
pH-waarde : (dosering : 1 – 3 ml/L in RO water)	20°C	Ca. 2,8 – 3,2
Geleidbaarheid : (dosering : 1 – 3 ml/L in RO water)	20°C	Ca. 2,2 – 4,6 mS/cm

Producten



Service



Garantie



Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Microtek Medical BV, A Division of Ecolab
Hekkehorst 24, 7207 BN ZUTPHEN (NL)
Tel : 31 575.599.200